

Análisis disponible

HLA-B*5701

Muestras

Las muestras de sangre total se deben recoger en tubos de EDTA (plástico) de 4ml. **No enviar plasma.** El volumen mínimo de la muestra de sangre es de 1 ml. No llene en exceso los tubos y tenga en cuenta la expansión si se ha de congelar la muestra (véase más abajo).

Almacenaje de las muestras

Si entre la toma de las muestras y el transporte no pasan más de 5 días, las muestras se pueden mantener refrigeradas a 4 °C antes del transporte. Si el transporte debe producirse más tarde, las muestras de sangre deben ser almacenadas entre -20°C y -40°C (NO a -70°C), si es necesario la sangre se ha de alicuotar en crioviales (que soporten la congelación).

Las muestras se han de enviar en contenedores especialmente diseñados para el transporte de material infeccioso. Todos ellos han de estar convenientemente marcados con el símbolo de "Riesgo Biológico" y cumplir los requisitos de rigidez y estanqueidad para evitar derrames de material infeccioso en caso de accidente.

Si las muestras se han congelado se deben enviar en nieve carbónica, se ha de introducir el contenedor en una caja de nieve carbónica y no al revés ya que el contenedor podría estallar. También se pueden enviar las muestras en contenedores especiales para congelación.

Formulario de solicitud de prueba

Rellene la solicitud de la prueba y asegúrese que las muestras son anónimas, para que el nombre completo del paciente no aparezca ni en el formulario ni en el/los tubo/s de muestra. No grape el formulario a las bolsas de muestras ya que esto presenta un peligro en el laboratorio. Asegúrese de que el formulario quede firmado por el médico solicitante. El formulario se encuentra disponible en nuestra página web a www.irsicaixa.com.

Transporte

Si las muestras no se han congelado se pueden enviar a temperatura ambiente, siempre que el transporte no dure más de 24 horas, o refrigeradas (si dura más de 24 horas). Si las muestras se han congelado se ha de mantener el estado de congelación.

Resultados

Las muestras se analizarán lo antes posible y en un plazo aproximado de 15 días.

Dirección para la entrega

Fundacio irisCaixa
Laboratori de Retrovirologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2ª planta. Edifici Maternal
08916 Badalona

Datos de contacto

Para más información:
Tel: 34-93 465 63 74
Fax: 34-93 465 39 68
Email: webirsi@irsicaixa.com
www.irsicaixa.com